

## Descritivo Técnico

### TAMPA PARA DECANULAÇÃO FAJ



A Tampa para Decanulação FAJ promove a oclusão total da cânula de traqueostomia impedindo a entrada de ar, auxiliando no processo de decanulação uma vez que permite o fluxo aéreo para as vias superiores com restabelecimento fisiológico da fonação, deglutição e respiração.

#### ATENÇÃO

- \* O produto é fornecido **NÃO** estéril;
- \* O **cuff** da cânula de traqueostomia **necessita estar completamente vazio** antes da tampa para decanulação ser colocada.;
- \* **Uso em um único paciente.**

## INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES

### INDICAÇÃO DE USO

A Tampa para Decanulação FAJ é destinada para uso no momento do processo de decanulação em pacientes adultos, pediátricos ou neonatos em uso de cânula de traqueostomia com conector de saída padrão com diâmetro de 15 mm.

### CONTRA INDICAÇÕES:

- Pacientes laringectomizados totais;
- Pacientes inconscientes e/ou comatosos;
- Obstrução das vias aéreas superiores;
- Estenose traqueal;
- Pneumotórax;
- Não utilizar em pacientes que apresentem dificuldade no manejo das secreções (aspiração maciça de saliva, dificuldade na força de tosse);
- Pacientes que não toleram o cuff desinsuflado;
- Traqueostomia com cuff de espuma;
- Pacientes com redução severa da complacência pulmonar com risco de aprisionamento do ar.

#### PRAZO DE VALIDADE

O produto possui validade de 03 (três) anos a partir da data de fabricação.

#### RECOMENDAÇÃO

A Fundação Adib Jatene determina vida útil estimada para o produto de 2 (dois) meses.

#### RESPONSÁVEL TÉCNICA

Biomédica Emi Sa Teles  
CRBM-SP: 10745

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo, SP - CEP 04012-180  
PABX: (11) 5085-6011 / 6009

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Ramal 215 - E-mail [biotecnica@fajbio.com.br](mailto:biotecnica@fajbio.com.br)

**SAC:** Ramal 210 - E-mail [sac@fajbio.com.br](mailto:sac@fajbio.com.br)