

## Descritivo Técnico

### TUBO TRAQUEAL EM T

Os tubos traqueais são produtos desenvolvidos para abertura da luz da traqueia, mantendo a via aérea adequada, dando suporte à traqueia estenótica que foi reconstituída ou reconstruída.

Os tubos traqueais consistem em um tubo de formato em "T", um anel de fixação e uma tampa unidos por uma alça. Produzidos em silicone grau médico 65-75 Shore A, os tubos traqueais também contém a gravação do lote no corpo da peça.



#### INDICAÇÃO DE USO

Os tubos traqueais são indicados para:

- Estenose traqueal;
- Ressecção Traqueal;
- Anastomoses termino-terminal;
- Reconstrução de traqueia;
- Traumatismo laringotraqueal.


Os tubos traqueais são destinados para implante em ambiente hospitalar, respeitando as técnicas de assepsia e devem ser realizados por um médico-cirurgião capacitado e familiarizado com a técnica de implante, por um período temporário de até 29 dias. Caso seja necessário prolongar o tratamento, o médico-cirurgião deverá substituir o tubo traqueal por um novo.

#### LIMITAÇÃO DE USO

Os tubos traqueais são contraindicados para uso em pacientes que estão em uso de ventilação mecânica e/ou apresentem rejeição ao uso de silicone.

## DIMENSIONAIS

Os tubos traqueais são fabricados com extensões excedentes às dimensões normais do complexo laringotraqueal, tendo como finalidade propiciar ao cirurgião a possibilidade de ajustar o comprimento, de acordo com as dimensões necessárias para cada paciente.

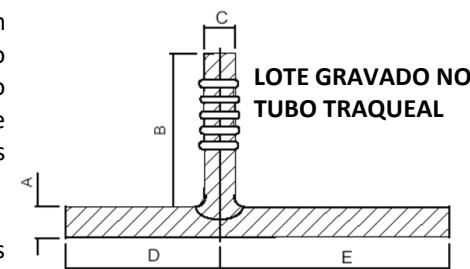

Os tubos traqueais possuem 5 (cinco) modelos com diferentes diâmetros conforme tabela abaixo:

CÓDIGO E DIMENSÕES (mm)					
CÓDIGO DO PRODUTO	A	B	C	D	E
PRD0400010 (TT-08)	Ø 08	33	Ø 07	37	61
PRD0400020 (TT-10)	Ø 10	42	Ø 09	45	77
PRD0400030 (TT-12)	Ø 12	49	Ø 10	60	105
PRD0400040 (TT-14)	Ø 14	60	Ø 10	60	105
PRD0400050 (TT-16)	Ø 16	60	Ø 10	60	105

**O produto é fornecido NÃO estéril, podendo ser esterilizado em autoclave ou peróxido de hidrogênio - vapor (Sterrad).**

PRAZO DE VALIDADE	RECOMENDAÇÃO	Responsável Técnica
O produto possui validade de <b>03 (três) anos</b> a partir da data de fabricação antes do implante.	Substituir o tubo traqueal após <b>29 (vinte e nove) dias</b> .	Biomédica Emi Sa Teles CRBM-SP: 10745

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo, SP - CEP 04012-180  
 PABX: (11) 5085-6011 / 6009

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Ramal 215 - E-mail biotecnica@fajbio.com.br  
**SAC:** Ramal 215 - E-mail sac@fajbio.com.br